

...porque biossegurança responsável e consciente, requer cuidado e desinfecção dos seus instrumentais.

ARPO® SEPT SACHÊ

Ácido peracético “*in situ*”



Profilática

ARPO®SEPT SACHÊ

Trata-se de uma composição em pó que ao entrar em contato com a água gera uma concentração de ácido peracético, em pH neutro a levemente alcalino e com alta eficácia antimicrobiana. Esta também é uma composição mais avançada, altamente compatível com instrumentais e com o meio ambiente.



Produto livre de aldeídos, derivados de cloro e álcool. Não fixa matéria orgânica.



Com alto poder de limpeza e desinfecção.



Composição avançada de ácido peracético “IN SITU”.

Apresentação Comercial

ARPO®SEPT

Assistência à saúde

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES
NO RÓTULO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE
PARA USO PROFISSIONAL. PROIBIDA
A UTILIZAÇÃO DIRETA AO PÚBLICO



Endoscópios e
materiais ópticos



Instrumentais
termossensíveis

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

ARPO® 
S W I T Z E R L A N D

CONTÉM 20g

ARPO®SEPT SACHÊ

- É um ácido peracético “*in situ*” a 0,2%, gerado a partir de componentes não danosos aos instrumentais, mesmo os mais sensíveis.
- Testado e aprovado na eliminação de **microrganismos de alta resistência**.



Instrumentais
termossensíveis.



Endoscópios e
materiais oftálmicos.

Propriedades

Princípio ativo em sua exclusiva composição o ácido peracético *"in situ"*, gerado a partir do percarbonato de sódio + Tetra acetil etileno diamina (TAED).

Sua avançada composição elimina facilmente os microrganismos mais resistentes como: esporos, micobactérias, bactérias, fungos e vírus.

Alto rendimento: 1 sachê de ARPO®SEPT para 1L de água aquecida entre 25° e 40°C.




1 Sachê

+



1L de água

=

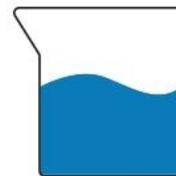

1 litro de solução
de ácido peracético
pronta para uso.





Desinfecção de Alto Nível em apenas 15 minutos!



MODO DE USO

para desinfecção de Alto Nível

1. Diluir o produto na concentração de 2% (1 sachê para 1L de água aquecida entre 25°C e 40°C);
2. Agitar a solução até total homogeneização com auxílio de uma espátula ou misturador;
3. Após limpeza e secagem, imergir totalmente os artigos, desarticulados e desmontados na solução de **ARPO®SEPT** expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens e canais;
4. Remover os artigos e enxaguar em água potável, secar assepticamente e destinar ao uso imediato.



Apresentação Comercial



Acesse o nosso site e conheça mais sobre o **ARPO® SEPT SACHÊ!**



Central de atendimento

 0800 940 0075

 /profilatica

 @profilatica

 www.profilatica.com.br

 R. José Cheinfert, 315 - Barigui, Araucária