

...porque biossegurança responsável e
consciente, requer cuidado e preservação
de suas peças de mão e micromotores.

PROFISEPT LUB SPRAY



Profilática



PROFISEPT LUB SPRAY

Deve ser aplicado após cuidadosa limpeza, antes da esterilização, sendo compatível com o vapor e alta temperatura. Limpa turbinas, motores a ar, hastes e cabeçotes para garantir um serviço eficaz e duradouro.



Protege e lubrifica os instrumentais.



**Não contém CFC
(Cloro Flúor Carbono).**

PROFISEPT LUB SPRAY

é um lubrificante em forma de spray à base de óleo especialmente desenvolvido e indicado para lubrificação e preservação das peças de mão.

Além disso, ajuda a manter o valor dos micromotores e peças de mão, através de uma ótima lubrificação, oferecendo proteção eficaz contra desgaste e corrosão por atrito.

ÓLEO COM ALTO GRAU DE PUREZA.



Não oleoso, não pegajoso e previne a corrosão de materiais.



Prolonga vida útil do instrumental e possui alta compatibilidade com materiais.



Reduz gastos com reparos e reposições.



Produto inodoro.

Aplicação

Na cabeça

Identifique o bico adequado conforme o instrumento a ser lubrificado e encaixe até o final.

Ponteira desconectada.



Produto permeável ao vapor e adequado a altas temperaturas.

Acoplagem do produto também pode ser feita na parte inferior do instrumental.

obs:

agite antes de usar e sempre utilize o bico aplicador adequado para cada encaixe e uso.

APlicação

*Sempre lubrifique o seu instrumental
antes de cada esterilização.*

*O óleo deve sair limpo pela pinça que
segura a broca. Em caso de resíduo, é
necessário repetir a operação.*



Quando lubrificar sua caneta?

- | Antes de utilizar pela primeira vez.

- | Antes de cada ciclo de esterilização.

- | Antes do início de cada turno de trabalho (manhã, início da tarde e noite).



Acesse o nosso site e conheça mais
sobre o **PROFISEPT LUB**
SPRAY!



Central de atendimento



0800 940 0075