



FICHA TÉCNICA ENZILUX - PROFILÁTICA

Data: 08/01/2024

Revisão: 03

Página 1 de 3

ENZILUX – PROFILÁTICA

Detergente Enzimático



1. FINALIDADE E INDICAÇÕES DE USO

ENZILUX é um detergente enzimático concentrado de alto desempenho. Composto por 4 tipos de enzimas: protease, amilase, carbohidrase e lipase. Sua formulação sinérgica possibilita excelente estabilidade enzimática, garantindo a máxima remoção da matéria orgânica nos processos de limpeza. Graças a seu tensoativo de última geração, ENZILUX possui baixa espumação, sendo indicado para processos manuais e automatizados, e para todos os tipos de materiais que compõem os PPS (produtos para saúde).

2. MODO DE USO

LIMPEZA MANUAL: Diluir 2ml de ENZILUX para cada 998ml de água à temperatura entre 30°C e 48°C. Imergir totalmente os artigos abertos, desarticulados e desmontados na solução, expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens e canais, deixando-os em contato com a solução por 5 a 10 minutos. Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

LIMPEZA AUTOMÁTICA (LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE INSTRUMENTOS, FIBROSCÓPIOS E LAVADORAS ULTRASSÔNICAS): Colocar o ENZILUX no compartimento destinado ao produto de limpeza. Diluir 2ml de ENZILUX para cada 998ml de água. Utilizar temperatura entre 40°C e 55°C e tempo de contato entre 5 a 10 minutos. Seguir a programação da máquina para o processo de limpeza conforme instruções do fabricante.



FICHA TÉCNICA ENZILUX - PROFILÁTICA

Data: 08/01/2024

Revisão: 03

Página 2 de 3

RECOMENDAÇÕES QUANTO À QUALIDADE DA ÁGUA

pH entre 6,0 e 9,5

Condutividade <900 uS/cm

Dureza – até 400 mg/L de CaCO₃

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.

3. VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Compatível com diferentes tipos de instrumentais: aço, alumínio cromado, latão, polimetilmetacrilato, policarbonato, polipropileno, polietileno, poliésterol, PVC macio;
- Baixa espuma;
- Tensoativo não iônico de alto desempenho – permite maior solubilização e remoção da sujidade;
- Alta atividade enzimática;
- Alta eficácia de limpeza e compatibilidade com instrumentais delicados (inclusive materiais anodizados) decorrente da especial combinação tensoativa com as 4 enzimas que compõe a formulação do detergente. Sua composição equilibrada de enzimas atua na remoção da matéria orgânica dissolvendo os substratos específicos que dificultam a limpeza.
- Não irritante dérmico ou ocular;

4. COMPOSIÇÃO

Enzimas protease, amilase, carboidrase e lipase, tensoativo não iônico 2,5% (blend de alquil glicosídeo e álcool etoxilado), sequestrante, estabilizante, umectante, solvente e veículo.

5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
pH do produto puro	6,5 – 7,5
Densidade (g/ml 20°C)	1,000 – 1,040



FICHA TÉCNICA ENZILUX - PROFILÁTICA

Página 3 de 3

Data: 08/01/2024

Revisão: 03

Aspecto	Líquido amarelo
Odor	Característico

7. COMPATIBILIDADE

ENZILUX é compatível com diversos tipos de materiais: aço, alumínio cromado, latão, polimetilmetacrilato, policarbonato, polipropileno, polietileno, poliésterol, PVC macio plásticos, borracha, silicone, acrílico, teflon, vidro, tecidos.

8. SEGURANÇA

ENZILUX é um produto seguro para uso, possuindo laudos de toxicidade oral aguda (DL50), irritabilidade dérmica e ocular.

9. ESTABILIDADE

ENZILUX é um produto altamente concentrado, com validade de 24 meses após a data de fabricação.

10. PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

11. PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

12. APRESENTAÇÕES DISPONÍVEIS

Bombona de 5L

Frasco de 1L

13. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func. /M.S. 3.02.430-3

REGISTRO NA ANVISA N° 3.2430.0014