



FICHA TÉCNICA PROFILUB - PROFILÁTICA

Data: 08/04/2022

Revisão: 01

Página 1 de 2

1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
pH do produto puro	5,00 – 6,00
Densidade (g/ml 20°C)	0,985 – 1,015
Aspecto	Líquido
Cor	Branco leitoso
Odor	Característico

2 COMPOSIÇÃO

Óleo mineral, tensoativo não iônico (Álcool graxo etoxilado 1%), espessante, emulsificante, conservante e veículo.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

EMULSÃO LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Previne ferrugem, manchas e travamento de instrumentais;
- Indicado para utilização diária, antes dos processos de autoclavagem;
- Previne corrosão e aumenta a vida útil dos instrumentais;
- Tempo de contato imediato;
- Possui alta compatibilidade com instrumentais e artigos metálicos (Ex: aço inox e alumínio anodizados);
- Biodegradável.

5 MODO DE USO

LUBRIFICAÇÃO MANUAL: Diluir 8ml de PROFILUB concentrado para cada litro de água, mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução. Movimente as articulações para melhor penetração. Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos. Após escorrido o produto dos instrumentos, envelope-os e direcione-os para o processo de esterilização mais adequado.

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS: Coloque PROFILUB concentrado diretamente no compartimento destinado aos produtos de limpeza, diluir 5ml de PROFILUB concentrado para cada litro de água. Siga as recomendações do fabricante do equipamento.



FICHA TÉCNICA PROFILUB - PROFILÁTICA

Data: 08/04/2022

Revisão: 01

Página 2 de 2

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilize PROFILUB após o processo de esterilização e desinfecção.

6 RISCOS

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETO AO PÚBLICO.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

9 ARMAZENAGEM

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

10 PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: Bombona plástica 5L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 2 bombonas de 5L = 10 L.

Embalagem primária: Frasco plástico 1L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 6 frascos de 1L = 6 L.

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func./M.S. 3.02.430-3

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.231547/2016-71