



FICHA TÉCNICA PROFISEPT DRY WYPE - PROFILÁTICA

Página 1 de 3

Data: 11/04/2022

Revisão: 00

1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Lenço descartáveis
Cor	Branco
Odor	Característico

2 COMPOSIÇÃO

Viscose 50%, poliéster 50%.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

LENÇO SECO PARA APLICAÇÃO A SECO OU UMEDECIDO COM PRODUTO DE LIMPEZA OU DESINFECÇÃO.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Substitui papel toalha, toalhas e panos de maneira prática e sem deixar resíduos;
- Compatibilidade com ampla variedade de superfícies e produtos.
- Dispenser + invólucro refil garantem que o produto permaneça protegido mesmo após aberto;
- Composição tecnológica de fibras que garantem maior absorção e mais resistência;
- Não solta fibras;
- Maior capacidade de absorção de líquidos.

5 MODO DE USO

PREPARO PARA MOLHAMENTO DOS LENÇOS SECOS, UTILIZANDO O FRASCO APLICADOR (BORRIFADOR):

1. Calce luvas (EPIs). **2.** Rompa, ou corte com uma tesoura, a parte superior do saco plástico que envolve os lenços secos (WIPES) do refil. **3.** Insira o rolo, com os lenços ainda no saco, dentro do baldinho. **4.** A partir do centro do rolo, puxe uma ponta do lenço e introduza no orifício de saída da tampa e retire o lenço seco (WIPE) de dentro do baldinho. **5.** Com uma das mãos, segure o lenço a uma distância aproximada de 10cm do frasco aplicador (borrifador) e acione o gatilho do frasco para umedecimento do lenço (WIPE). **6.** Uma vez umedecido, aplique o mesmo friccionando-o sobre a superfície a ser limpa e desinfetada. **7.** Ao término do processo, descartar o lenço utilizado e, se necessário, dependendo da extensão da superfície, repetir o procedimento com um novo lenço umedecido.



FICHA TÉCNICA PROFISEPT DRY WYPE - PROFILÁTICA

Página 2 de 3

Data: 11/04/2022

Revisão: 00

PREPARO PARA MOLHAMENTO DOS LENÇOS SECOS, USO E TROCA DO REFIL:

1. Calce luvas (EPIs). **2.** Rompa, ou corte com uma tesoura, a parte superior do saco plástico que envolve os lenços secos (WIPES) do refil, permitindo que o rolo de lenços ainda permaneça dentro do saco plástico. **3.** Insira o saco plástico, com os lenços ainda no saco, dentro do baldinho e dobre a extremidade aberta, que sobra do saco plástico, sobre as bordas do baldinho. **4.** Com a tampa do baldinho ainda aberta, adicione 2 litros de desinfetante (SURFIC ou ARPOSAFE MULTI) dentro do saco plástico, para molhamento dos lenços. **5.** Feche a tampa do baldinho sobre as bordas do saco plástico, que deverá ficar para fora até a nova troca de refil. **6.** Preencha uma etiqueta com os dados do produto, data do preparo, validade da solução preparada e responsável pelo preparo, e cole a etiqueta no corpo do frasco. **Validade:** Os panos umedecidos podem ser usados até o final da validade do produto preparado para uso. **Descarte:** Ao término do uso, após o último lenço, abra a tampa e remova o saco plástico vazio e descarte-o no lixo. O baldinho estará seco, limpo e pronto para receber o novo refil. Se achar necessário, limpar internamente o baldinho dispensador com um lenço umedecido pelo próprio produto, secar e colocar um novo refil do **PROFISEPT DRY WIPE**.

6 RISCOS

NÃO SE APLICA.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

NÃO SE APLICA.

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

NÃO SE APLICA.

9 ARMAZENAGEM

Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

10 PRAZO DE VALIDADE

NÃO SE APLICA.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: 01 Dispenser + 01 refil com 100 wipes de 15x30cm

02 Dispensers + 01 refil com 100 wipes de 15x30cm

Embalagem secundária: Caixa de papelão.



FICHA TÉCNICA
PROFISEPT DRY WYPE - PROFILÁTICA

Página 3 de 3

Data: 11/04/2022

Revisão: 00

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

NÃO SE APLICA.